
1 Geltungsbereich

Alle Beschäftigten die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind

2 Arbeitsgang

Aufbereitung benutzter endodontischer Instrumente von der Reinigung bis zur Desinfektion

3 Zweck

Mit dieser Arbeitsanweisung wird das Aufbereitungsverfahren von benutzten endodontischen Instrumenten festgelegt.

4 Zuständigkeiten

Alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind, sind für den Inhalt und die praktische Umsetzung dieser Arbeitsanweisung verantwortlich.

erstellt:

geprüft:

freigegeben:

Datum:

Datum:

Datum:

5 Regelungen

Ziel: Aufbereitung benutzter endodontischer Instrumente von der Reinigung bis zur Desinfektion

Arbeitsbereich: Behandlungszimmer, Aufbereitungsraum

Arbeitsablauf:

Pos.	Arbeitsschritte	Zuordnung	Anweisungen
1. 1.1	Vordesinfektion Tragen von Schutzhandschuhen	Alle Beschäftigten die mit der Aufbereitung von MP be- traut sind	Im Umgang mit Desinfektionslösungen und Reinigungsmittel sind Schutzhandschuhe zu tragen, ebenso beim Aufbereiten sämtlicher Instrumente
1.2	Vorbereitung zur Desinfektion	Alle Beschäftigten die mit der Aufbereitung von MP be- traut sind	Instrumente nach Gebrauch in dem im Hygieneplan aufgeführten Gefäß lagern. Nicht mehr aufbereitbare Instrumente gemäß Hygieneplan / Abfallentsorgung aussondern. Bei wieder verwendbaren Instrumenten auf vollständige Benetzung mit der Reinigungs- und Desinfektionslösung achten
1.3	Ansetzen einer Desinfektionslösung	Alle Beschäftigten die mit der Aufbereitung von MP be- traut sind	Ansatz der Lösung gemäß Herstellerangaben; Standzeit und Verschmutzungsgrad beachten; Beachtung der maximalen Verwendungs- bzw. Aufbereitungszyklen gemäß Herstellerangaben

erstellt:	geprüft:	freigegeben:
Datum:	Datum:	Datum:

Arbeitsanweisung

**Zahnarztpraxis
Dr. Mustermann**

Element: 06

Management der Mittel

Revision: A

AA-06-09

Aufbereitung endodontischer Instrumente

Seite 3 von 4

Pos.	Arbeitsschritte	Zuordnung	Anweisungen
2.	Reinigung	Alle Beschäftigten die mit der Aufbereitung von MP betraut sind	Ggf. nach Transport oder Ablage: Einwirkzeit gemäß Herstellerangaben beachten, Instrumente entnehmen und mit demineralisiertem Wasser abspülen. Verschmutzungen der Instrumente mit einem geeigneten Bürstchen ggf. unter Lupenkontrolle entfernen. Beschädigte Instrumente gemäß Hygieneplan / Abfallentsorgung aussondern. Kontrolle der Einwirkzeiten mit Stoppuhr. Sichtkontrolle nach Standzeit unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrad.
3.	Spülung	Alle Beschäftigten die mit der Aufbereitung von MP betraut sind	Nach dem Reinigungsvorgang sind die Instrumente mit klarem und demineralisiertem Wasser nachzuspülen.
4.	Trocknung	Alle Beschäftigten die mit der Aufbereitung von MP betraut sind	Die gereinigten Instrumente werden zur Trocknung in einer Auffangschale abgelegt. Nach der Abtrocknung erfolgt die Überprüfung der Instrumente auf den Trocknungsgrad und auf die Unversehrtheit der Oberfläche.
5.	Sterilisation	Alle Beschäftigten die mit der Aufbereitung von MP betraut sind	Sterilisation aller gereinigten und getrockneten Instrumente im Autoklaven. Instrumente werden in Papier-Folien-Verpackung oder geeigneten Trays bei geplanter Lagerung sterilisiert.
6.	Freigabe	Alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung	Prüfung auf erfolgreiche Sterilisation durch Sichtkontrolle des verwendeten Prüfkörpers. Anschließend Chargendokumentation.

erstellt:

geprüft:

freigegeben:

Datum:

Datum:

Datum:

6 Änderungsdienst

Die zu dieser Arbeitsanweisung eingebrachten Änderungen bedürfen der Kontrolle und Zustimmung der Praxisleitung.

Nach der i. O. – Prüfung wird die geänderte Arbeitsanweisung durch die Praxisleitung per Unterschrift und Datum freigegeben.

Die Pflege dieser Arbeitsanweisung übernimmt die Qualitätsmanagement – Beauftragte.

7 Dokumentation

[Chargenkontrollnachweis](#)

Mitgeltende Unterlagen

Herstellerbeschreibung der jeweiligen endodontischen Instrumenten
Herstellerhinweise bzw. Gebrauchsanweisungen der eingesetzten Desinfektionsmittel.

[Hygieneplan](#)

[Übersicht der Aufbereitungs- und Freigabeberechtigten](#)

erstellt:	geprüft:	freigegeben:
Datum:	Datum:	Datum: